

Indicaciones para servicio de detección de patógenos de transmisión sexual

Las muestras que pueden ser recibidas para estudios de detección de patógenos de transmisión sexual (Virus del papiloma humano, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Neisseria gonorrhoeae*, y *Chlamydia trachomatis*) mediante qPCR o hibridación en tira son:

- Raspado vaginal, cervicovaginal o endocervical.
- Raspado rectal y/o anal
- Raspado uretral y peniana
- Raspado bucal

Indicaciones para toma

La muestra debe ser recolectada mediante raspado con un aplicador (cepillo o hisopo) estéril en la zona afectada y colocarse en un frasco estéril con al menos 10 ml de medio de transporte de los siguientes:

- Medio de transporte viral (VTM)
- Medio de transporte universal (UTM)
- Medio ThinPrep®
- Medio CellSolutions™ General Cytology Preservative

Nota: Para el caso de raspados uretrales, asegurarse de introducir suavemente el aplicador aproximadamente tres cuartos de pulgada (2 centímetros) dentro de la uretra.

Los siguientes factores pueden actuar como inhibidores de la prueba y arrojar un resultado inconcluso o no concluyente. Favor de evitar:

- Cepillos de algodón o con vástago de madera.
- Muestras con más de un 2% de v/v de sangre o presencia de mucosidad abundante.
- Guantes de látex con polvo.
- Agentes espermicidas o cualquier tratamiento vaginal.
- Recolección de muestra durante la menstruación.

Indicaciones para envío

Pueden mantenerse almacenadas a temperatura ambiente 2-3 semanas previo a su envío. Transporte a temperatura ambiente en sobres de papel o bolsas de plástico.

Novogen no se hace responsable por resultados no concluyentes derivados de no seguir las indicaciones provistas.

Los resultados son enviados **únicamente** a la persona física o moral indicada en el campo de "solicitante" de la **solicitud de servicio**. En caso de ser un laboratorio que subroga muestras, colocar los datos del laboratorio.