

### Indicaciones para servicio de detección de SARS-CoV-2 (COVID-19)

Las muestras que pueden ser recibidas para estudios de detección del virus SARS-CoV-2 (COVID-19):

- Raspado nasofaríngeo
- Raspado orofaríngeo
- Raspado nasal

#### Indicaciones para toma

La muestra debe ser recolectada mediante raspado con cepillo o hisopo estéril y colocarse en un frasco estéril con al menos 2 ml de medio de transporte de los siguientes:

- Medio de transporte viral (VTM)
- Medio de transporte universal (UTM)
- Medio proporcionado por Novogen.

Los siguientes factores pueden actuar como inhibidores de la prueba y arrojar un resultado inconcluso o no concluyente. Favor de evitar:

- Consumo de alimentos y/o bebidas de cualquier tipo al menos 1 hora antes de la toma de muestra.
- Cepillarse los dientes al menos 1 hora antes de la toma de muestra.
- Fumar al menos 1 hora antes de la toma de muestra.
- Cualquier tratamiento de nebulización.

#### Indicaciones para envío

Pueden mantenerse almacenadas a temperatura de refrigeración (2 a 8°C) 1-2 días previo a su envío. Transporte a temperatura de refrigeración (2 a 8°C) en hielera.

Novogen no se hace responsable por resultados no concluyentes derivados de no seguir las indicaciones provistas.

Los resultados son enviados únicamente a la persona física o moral indicada en el campo de "solicitante" de la solicitud de servicio. En caso de ser un laboratorio que subroga muestras, colocar los datos del laboratorio.